

1. DEFINICJA
2. OPIS
3. ZASTOSOWANIE
4. PERSONALIZACJA **Andropenis**®
5. ZAKŁADANIE **Andropenis**®
6. SKRZYWIENIE PENISA I CHOROBA PEYRONIE'EGO
7. SPOSÓB UŻYCIA **Andropeyronie**® (SKRZYWIENIE PENISA I CHOROBA PEYRONIE'EGO)
8. SPOSÓB UŻYCIA **Andropeyronie**® **Surgery Edition** (PO OPERACJACH UROLOGICZNYCH)
9. SPOSÓB STOSOWANIA URZĄDZENIA **Andropenis**® (PO OPERACJACH UROLOGICZNYCH)
10. SPOSÓB UŻYCIA
11. MAŚCI

UWAGA:

Andropenis® dostępny jest w następujących wariantach: **Andropenis**® (wyprodukowany z aluminium, wersja podstawowa), **Andropenis Gold**® (wyprodukowany ze złota, wersja luksusowa), **Andropenis Mini**® (przeznaczony dla członków o długości poniżej 8 cm w stanie wzwodu), **Andropeyronie**® (wyprodukowany z aluminium, służący do korekcji krzywizn), **Andropeyronie**® **Surgery Edition** (wyprodukowany z aluminium, służący do użytku po operacjach) i **Androextender**® (wyprodukowany z aluminium, wersja podstawowa). Instrukcje obsługi są jednakowe dla wszystkich wersji.



fig. 1

1. DEFINICJA

Andropenis® to urządzenie medyczne, mocowane zewnętrznie do penisu. W połączeniu z tkanką penisu wywiera na penis niewielką siłę rozciągającą, którą można dostosować w zależności od potrzeb pacjenta. Stosowanie urządzenia zaleca się w celach estetycznych i medycznych. Uwaga: Przed pierwszym użyciem, skonsultuj się ze swoim lekarzem i postępuj zgodnie z jego zaleceniami.

2. OPIS

Andropenis® składa się z plastikowego pierścienia u podstawy, dwóch metalowych prętów z wewnętrznymi sprężynami oraz górnej części plastikowej z taśmą silikonową. Części plastikowe wykonane są z POM (polioksymetylenu). Taśma wykonana jest z silikonu wykorzystywanego w medycynie. Metalowe pręty urządzenia **Andropenis® original** są zrobione z niklu, a **Andropenis® gold** – z niklu pokrytego 24-karatowym złotem. Sprężyny wykonane są z cienkiej stali, a przedłużki z aluminium stosowanego w chirurgii.

Uwaga: Wszystkie materiały i części urządzenia są wytwarzane zgodnie ze standardami zarządzania jakością (ISO:13485:2003 i ISO 9001:2008), są biokompatybilne i nie zawierają cytotoksyn (ISO 10993); stosowanie urządzenia nie stanowi żadnego zagrożenia dla zdrowia.

CZĘŚCI SKŁADOWE (rys. 1): 1-plastikowy pierścień u podstawy, 2-okrągła część z otworem, 3-pręt gwintowany, 4-śruba regulacyjna z gwintem na dole, 5-metalowa rurka, 6-śruba, 7-sprężyna, 8-śruba do zamocowania sprężyny, 9-przedłużka duża o długości 4 cm, 10- przedłużka średnia o długości 2 cm, 11-przedłużka mała o długości 0,5 cm, 12-najmniejsza przedłużka o długości 0,3 cm, 13-górna podpora z plastiku, 14-taśma silikonowa, 15-rurka ochronna.

UWAGA: Zaleca się wpuścić kroplę oleju między części 4 i 5, aby ułatwić nasuwanie (patrz OIL).

3. ZASTOSOWANIE

- ✚ Leczenie choroby Peyronie'ego i korekcja wrodzonych skrzywień penisu
- ✚ Leczenie hipogonadyzmu męskiego; mikropenisu lub małego penisu.
- ✚ Leczenie estetyczne za pomocą wydłużania i pogrubiania penisu.
- ✚ Po niektórych operacjach urologicznych (prostatektomia, operacje penisu, urazy, złamanie prącia, itd.), aby uniknąć skrócenia członka w związku z kurczeniem się blizn.
- ✚ Poprawiona sztywność w czasie stosunku poprzez zwiększenie rozmiaru (obwód jak i długość) oraz przez poprawę kształtu.

Przeciwwskazania: Pacjenci z niekontrolowaną cukrzycą, opryszczką genitalną, chorobami przenoszonymi drogą płciową, ostrym zapaleniem cewki moczowej i pęcherza moczowego, ostrym zapaleniem gruczołu krokowego, przepukliną pachwinową, zapaleniem najądrza, rakiem jądra, nowotworem limfatycznym, obrzękiem limfatycznym, paraplegię, tetraplegię a także pacjenci stosujący leki przeciwzakrzepowe. Rezultaty będą gorsze lub ich nie będzie w przypadku niskiego poziomu testosteronu lub jego poziomu z dolnego zakresu skali. Nie zalecamy stosowania osobom poniżej 18 roku życia.

Efekty uboczne: **Andropenis®** został zaprojektowany specjalnie do celów medycznych i jego stosowanie nie wywołuje skutków ubocznych jeśli tylko używany jest prawidłowo i zgodnie z zaleceniami z instrukcji użytkownika.




4. PERSONALIZACJA Andropenis®

Początkowy rozmiar **Andropenis®** to 8 cm. Rozmiar urządzenia mierzy się od dolnego krańca pierścienia do końca metalowej przedłużki (rys. 4 INITIAL).

Przystosuj **Andropenis®** do rozmiarów własnego członka.

Za pomocą centymetra zmierz długość i obwód penisa najpierw w spoczynku, a potem w stanie erekcji (rys. 2 i 3).

Obliczanie odpowiedniego dla siebie rozmiaru urządzenia: odejmij 4 cm od długości członka w stanie erekcji.

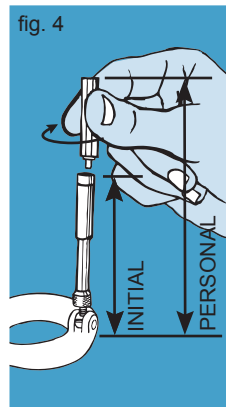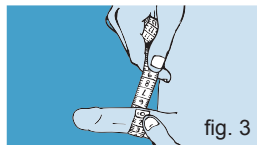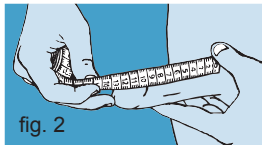

Przykład: 14,7 cm. – 4 cm. = 10,7 cm. > Rozmiar twojego **Andropenis®** = 10,7 cm.

Przygotuj urządzenie, aby jego rozmiar odpowiadał rozmiarowi obliczonemu wcześniej.

Zdejmij górną plastikową podporę, pociągając do góry (rys. 5)

Dodaj do końca urządzenia tyle części, ile trzeba, aby **Andropenis®** miał dany rozmiar (rys. 4 PERSONAL).



Przykład: Rozmiar twojego Andropenis® 10,7 cm. = początkowy **Andropenis®** (8 cm.) + część 10 (2 cm.) + część 11 (0,5 cm.).

Uwaga: Rozmiar początkowy Andropenis Mini wynosi 7 cm. Jeśli posiadasz tę wersję, rozpocznij użycie od okresu dostosowania do tego rozmiaru (7 cm) i zachowaj go przez kolejne 15 dni: pierwszego dnia noś urządzenie przez 3 godziny i, wraz z upływem dni, zwiększaj stopniowo czas użycia. Po upływie pierwszych 15 dni, zacznij zwiększać czas stosowania, zgodnie z tablicami użycia (patrz dalej).

5. ZAKŁADANIE Andropenis®

Włóż tę silikonową taśmę (część 14), która najlepiej pasuje do właściwej podkładki ochronnej dopasowanej do rozmiaru penisa (część 15). Użycie rurki jest **OBOWIĄZKOWE**. Potem włóż końce taśmy silikonowej do otworów górnej, plastikowej podpory (część 13) tak, aby powstała pętla.

Mając penis w spoczynku, odciągnij do siebie całą skórę napletka (mężczyźni nie obrzezani), która pokrywa żołądź (rys. 7) i nałóż silikonowy pierścień poniżej korony żołądź, tam gdzie łączy się z trzonem prącia (rys. 8).



Żołądź nie powinna mieć bezpośredniego kontaktu z urządzeniem. Następnie należy odciągnąć penis od ciała tak, aby był on rozciągnięty w stanie spoczynku.

Weź pierścień podstawy (część 1), zwracając go węższą częścią do góry. Włóż penis do pierścienia podstawy (część 1), a żołądź połóż we wgłębieniu górnej podpory (część 13).

Położ lewą dłoń na górnej podporze (część 13) i przyciśnij urządzenie do ciała, aby się nieco skróciło (rys. 9).

Przyciskając lewą dłonią, włóż palec prawej dłoni w silikonową pętlę i przelóż przez nią żołądź (rys. 10).

Położ kciuk lewej dłoni na wędzidelku, aby przytrzymać żołądź i stopniowo zaciskaj pętlę ze znajdującą się w niej żołądź, pociągając nieco prawą dłonią za oba końce taśmy silikonowej (rys. 11).

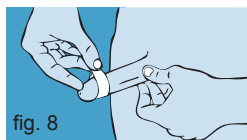
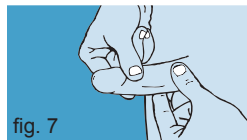


Rób to powoli. Odciągnij skórę z przodu i z tyłu penisa do siebie, aby nie przyciąć wędzidełka i nie pofałdować skóry na bruzdzie żołądzi (rys. 12).

Pętla musi nieco uciskać żołądź, aby się nie wysliznęła, nie powodując jednak bólu. Delikatnie umieść silikonową taśmę w otworach na spodzie górnej podpory (część 13); taśma rozciągnie się kiedy naciskasz między wgłębieniami. Ściśnij, ale nie ciągnij w dół, aby nie przyciąć skóry (rys. 13).

Sprawdź, czy na wędzidełku i bruzdzie żołądzi nie ma fałd skóry, i jeśli są, odciągnij skórę z przodu i z tyłu penisa do siebie, aby jej nie przyciąć.

Aby zdjąć **Andropenis®**, przyciśnij urządzenie do ciała, ściskając wewnętrzne sprężyny. W tej pozycji wyjmij taśmę silikonową (część 14) z rowków górnej podpory (część 13). Stopniowo powiększ silikonową pętlę i wyjmij z niej żołądź.

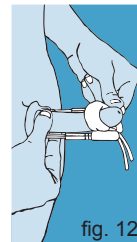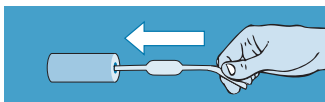


Andropenis® posiada system mocujący do żołądzi w kształcie paska, zwany **Androcomfort® band**. Dostępne są dwa modele: **Androcomfort® band** i **Androsilicone® band**.

Niniejszy system sprawia, że użycie **Andropenis®** staje się jeszcze wygodniejsze. Umieszcza się go między żołądź i trzonem penisa, w rowku żołądziowo-napletkowym.

Andropenis® zawiera pierścień silikonowy zwany **Androring®**, który działa jako system amortyzacyjny siły trakcyjnej. Umieszcza się go między żołądź i trzonem penisa, w rowku żołądziowo-napletkowym.

Andropeyronie® zawiera górną plastikową część (Androsupport), służącą do korekcji krzywizny penisa (patrz załącznik "Instrukcja Obsługi Androsupport").

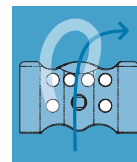


6. SKRZYWIENIE PENISA | CHOROBA PEYRONIE'EGO

Podstawowe Informacje Medyczne: penis składa się z dwóch kolumn gąbczastej tkanki, nazywanych ciałami jamistymi, oraz przewodu, którym uchodzi mocz, zwanego cewką moczową. Te ciała jamiste otoczone są warstwą elastycznej tkanki zwaną błoną białawą.

Istnieją dwie przyczyny skrzywienia penisa:

- ❏ **Choroba Peyronie'ego** (może pojawić się w każdym wieku)
- ❏ **Skrzywienie wrodzone penisa** (wykrywa się je w młodości)

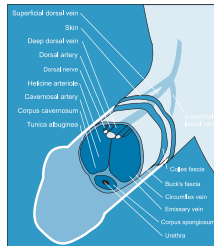


Chorobę Peyronie'ego, czyli stwardnienie plastyczne prącia, którego przyczyna nie jest znana, charakteryzuje włóknista osłonka w błonie białawej ciał jamistych członka. Stwardnienie to jest zwykle jednostronne, a jego skutkiem jest odchylenie penisa w czasie erekcji.

Najczęstszymi objawami są: deformacja członka oraz ból w czasie erekcji, a także zaburzenia erekcji. Najczęściej występuje u przedstawicieli rasy białej. 75% przypadków dotyka mężczyzn w wieku 45-60 lat.

Sposoby leczenia:

- ❏ **Verapamil**: zastrzyki w warstwę zwłóknienia, aby zablokować produkcję kolagenu. (W fazie badań są zastrzyki z interferonu.)
- ❏ **Andropeyronie®**: nie wszczepiana proteza przymocowywana do penisa, która wywiera siłę rozciągającą, zmniejszając skrzywienie nawet o 50%.
- ❏ **Witamina E lub Colchicine**: wspomagająco, zażywać doustnie.
- ❏ **Leczenie łączone: Andropenis® plus Verapamil plus witamina E**. Połączenie tych metod proponuje się jako medyczne zasady postępowania ambulatoryjnego w leczeniu choroby Peyronie'ego. Zawsze poradź się urologa przed rozpoczęciem jakiegokolwiek metody leczenia.
- ❏ **Operacja**: usunięcie warstwy zwłóknienia. Jednak zawsze efektem ubocznym jest skrócenie penisa lub wszczepienie zewnętrznej protezy. Aby tego uniknąć, używa się urządzenia przedłużającego członka (**Andropeyronie® Surgery Edition**).

Wrodzone skrzywienie penisa wykrywane jest u osób młodych. Powstaje ono, kiedy ciała jamiste rosną bardziej, niż cewka moczowa, co powoduje wygięcie członka podczas erekcji w dół lub w bok. Można leczyć operacyjnie i/lub używając **Andropeyronie®** przez 6 miesięcy.

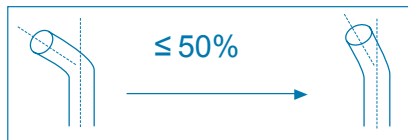

7.SPOSÓB UŻYCIA Andropeyronie® (SKRZYWIENIE PENISA I CHOROBA PEYRONIE'EGO)

Oprócz przypadków, gdy lekarz zaleci inaczej, leczenie składa się z dwóch etapów:

- 1) trwającego 15 dni etapu adaptacji
- 2) etapu ewolucji, który składa się z trzech różnych faz: fazy ewolucji początkowej (pierwszy i drugi miesiąc), fazy pośredniej (trzeci i czwarty miesiąc) oraz fazy ewolucji końcowej, która zaczyna się od piątego miesiąca.


Jakakolwiek modyfikacja wskazanego leczenia może zmienić rezultaty (skonsultuj z lekarzem).

	ROZMIAR URZĄDZENIA	LICZBA GODZIN DZIENNE
	Etap adaptacji	
5 pierwszych dni	Rozmiar początkowy	3 godzin
Dzień 6 -10	Dodaj małą przedłużkę o dł. 0,5 cm. (część 11)	6 godzin
Dzień 11 - 15	Dodaj małą przedłużkę o dł. 0,5 cm. (część 11)	8 godzin
	Etap ewolucji	
I i II miesiąc	Dodaj małą przedłużkę o dł. 0,5 cm. (część 11) co 7 dni	9 godzin
III i IV miesiąc	Dodaj małą przedłużkę o dł. 0,5 cm. (część 11) co 10 dni	9 godzin
Od V miesiąca	Dodaj małą przedłużkę o dł. 0,5 cm. (część 11) co 15 dni	9 godzin

Uwaga: dla własnej wygody począwszy od piątego miesiąca można dodać najpierw przedłużkę o długości 0,3 cm (część 12), a kilka dni później wymienić ją na przedłużkę o długości 0,5 cm (część 11), aby rozciąganie odbywało się stopniowo.

Pierwszego dnia, aby nabrać wprawy, załóż i zdejmij urządzenie 10 razy z rzędu. Zaleca się noszenie urządzenia po stronie przeciwnej do skrzywienia. Używając **Andropeyronie®**, co dwie godziny należy go zdjąć na parę minut, aby rozluźnić tkanki. Począwszy od piątego miesiąca trzeba odpoczywać co półtorej godziny. Wykorzystaj te odpoczynki, delikatnie masując członek. Myj urządzenie co cztery dni wodą i mydłem.

Bądź cierpliwy i konsekwentny w używaniu urządzenia. To klucz do osiągnięcia celu. Pierwsze rezultaty można zaobserwować po upływie 1,5 miesiąca od rozpoczęcia stosowania (15 dni adaptacji, a potem pierwszy miesiąc leczenia).

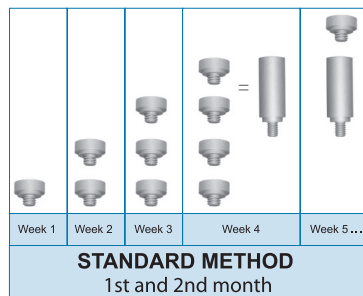

8. SPOSÓB UŻYCIA Andropeyronie® Surgery Edition (PO OPERACJACH UROLOGICZNYCH)

Jeśli operacja jest prosta, zaleca się rozpoczęcia używania **Andropeyronie® Surgery Edition** 15 dni po operacji.

Jeśli operacja jest bardzo złożona, zaleca się użycie **Andropeyronie® Surgery Edition** miesiąc po operacji.

Zawsze poradź się chirurga, aby wskazał, kiedy rozpocząć używanie **Andropeyronie® Surgery Edition** po operacji oraz jak długo go używać

Oprócz przypadków gdy lekarz zaleci inaczej, leczenie składa się z dwóch etapów:

- 📅 trwającego 15 dni etapu adaptacji
- 📅 etapu ewolucji, który składa się z dwóch różnych faz: fazy ewolucji początkowej (I i II miesiąc) oraz fazy ewolucji końcowej, która zaczyna się od trzeciego miesiąca.

Wszelka modyfikacja wskazanego leczenia wymaga konsultacji z chirurgiem.

	ROZMIAR URZĄDZENIA	LICZBA GODZIN DZIENNE
	Etap adaptacji	
5 pierwszych dni	Rozmiar początkowy	3 godziny
Dzień 6 - 10	Dodaj małą przedłużkę o dł. 0,5 cm. (część 11)	6 godzin
Dzień 11 - 15	Dodaj małą przedłużkę o dł. 0,5 cm. (część 11)	8 godzin
	Etap ewolucji	
I i II miesiąc	Dodaj małą przedłużkę o dł. 0,5 cm. (część 11) co 7 dni	8 godzin
Od III miesiąca	Dodaj małą przedłużkę o dł. 0,5 cm. (część 11) co miesiąc	8 godzin

Uwaga: dla własnej wygody począwszy od piątego miesiąca można dodać najpierw przedłużkę o dł. 0,3 cm (część 12), a kilka dni później wymienić ją na przedłużkę o dł. 0,5 cm (część 11), aby wyciąganie odbywało się stopniowo.

Pierwszego dnia, aby nabrać wprawy, załóż i zdejmij urządzenie 10 razy z rzędu. Zaleca się noszenie urządzenia jednego dnia na górnej części członka, drugiego dnia z jednego boku, kolejnego z drugiego boku. Używając **Andropeyronie® Surgery Edition**, co dwie godziny należy zdjąć go na parę minut, aby rozluźnić tkanki. Począwszy od piątego miesiąca trzeba odpoczywać co półtorej godziny. Wykorzystaj te odpoczynki, delikatnie masując członek. Myj urządzenie co cztery dni wodą i mydłem. Bądź cierpliwy i konsekwentny w używaniu urządzenia. To klucz do osiągnięcia celu. Pierwsze rezultaty można zaobserwować po upłynięciu półtora miesiąca od rozpoczęcia stosowania (15 dni adaptacji, a potem pierwszy miesiąc leczenia).



9. Sposób stosowania urządzenia Andropenis (po operacjach urologicznych)

Oprócz przypadków gdy lekarz zaleci inaczej, leczenie składa się z dwóch etapów:

- 📅 Trwającego 15 dni etapu adaptacji
- 📅 Etapu ewolucji, który składa się z trzech różnych faz: fazy ewolucji początkowej (pierwszy i drugi miesiąc), fazy pośredniej (trzeci i czwarty miesiąc) oraz fazy ewolucji końcowej, która zaczyna się od piątego miesiąca.


Jakakolwiek modyfikacja wskazanego leczenia może zmienić rezultaty (skonsultuj z lekarzem).

Na podstawie praktyki lekarskiej zaleca się wybór jednego z dwóch sposobów użycia:

	SPOSÓB STANDARDOWY			SPOSÓB SPECJALNY	
	ROZMIAR URZĄDZENIA	LICZBA GODZIN DZIENNE		ROZMIAR URZĄDZENIA	LICZBA GODZIN DZIENNE
	Etap adaptacji			Etap adaptacji	
5 pierwszych dni	Rozmiar początkowy	3 godziny	5 pierwszych dni	Rozmiar początkowy	4 godziny
Dzień 6 - 10	Dodaj małą przedłużkę o dł. 0,5 cm. (część 11)	6 godzin	Dzień 6 - 10	Dodaj małą przedłużkę o dł. 0,5 cm. (część 11)	4 godziny
Dzień 11 - 15	Dodaj małą przedłużkę o dł. 0,5 cm. (część 11)	8 godzin	Dzień 11 - 15	Dodaj małą przedłużkę o dł. 0,5 cm. (część 11)	4 godziny
	Etap ewolucji			Etap ewolucji	
I i II miesiąc	Dodaj małą przedłużkę o dł. 0,5 cm. (część 11) co 7 dni	9 godzin	I i II miesiąc	Dodaj małą przedłużkę o dł. 0,5 cm. (część 11) co 3 dni	4 godziny
III i IV miesiąc	Dodaj małą przedłużkę o dł. 0,5 cm. (część 11) co 10 dni	9 godzin	III i IV miesiąc	Dodaj małą przedłużkę o dł. 0,5 cm. (część 11) co 10 dni	4 godziny
Od V miesiąca	Dodaj małą przedłużkę o dł. 0,5 cm. (część 11) co 15 dni	9 godzin	Od V miesiąca	Dodaj małą przedłużkę o dł. 0,5 cm. (część 11) co 15 dni	4 godziny

Uwaga: dla własnej wygody począwszy od piątego miesiąca możesz dodać najpierw przedłużkę o dł. 0,3 cm (część 12), a kilka dni później wymienić ją na przedłużkę o dł. 0,5 cm (część 11), aby rozciąganie odbywało się stopniowo.

Pierwszego dnia, aby nabrać wprawy, załóż i zdejmij urządzenie 10 razy z rzędu. Zaleca się noszenie urządzenia jednego dnia na górnej części członka, drugiego dnia z jednego boku, kolejnego z drugiego boku. Używając urządzenia Andropenis®, co dwie godziny należy zdjąć go na parę minut, aby rozluźnić tkanki. Począwszy od piątego miesiąca, należy odpoczywać co 1,5 godziny. Wykorzystaj te odpoczynki do delikatnego masowania członka. Myj urządzenie co cztery dni wodą i mydłem. Bądź cierpliwy i konsekwentny w używaniu urządzenia. To klucz do osiągnięcia celu. Pierwsze rezultaty można zaobserwować po upłynięciu 1,5 miesiąca od rozpoczęcia stosowania (15 dni adaptacji, a potem pierwszy miesiąc leczenia).

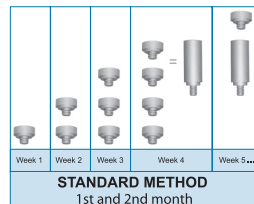

10. SPOSÓB UŻYCIA

Możliwe, że w którymś momencie stosowania sporadycznie będziesz odczuwał niewielkie dolegliwości. To normalne i nie wpływa na prawidłowy rozwój leczenia. Jednak w razie konieczności można przerwać stosowanie urządzenia w ciągu jednego dnia. Następnego dnia można ponownie je założyć, postępując jak zwykle.

W razie wystąpienia bólu, niewygody, niebieskawego przebarwienia lub odrętwienia żołędzia należy zdjąć urządzenie i pomasażać penis. Powinno to spowodować powrót normalnego koloru i ustąpienie nieprzyjemnych objawów. W razie uczucia lekkiego bólu w podstawie żołędzia należy osłonić to wrażliwe miejsce bawełną lub gazą.

Jeśli przez dwa tygodnie do miesiąca nie używasz urządzenia i chcesz znów zacząć je stosować, zmniejsz na początku jego rozmiar o 1 cm. Po 5 dniach zwiększ rozmiar o 0,5 cm, a po kolejnych 5 dniach – o kolejne 0,5 cm. Potem stosuj urządzenie jak wcześniej.

Po zdjęciu urządzenia będziesz miał dziwne uczucie pewnego dyskomfortu lub mrowienia. Nie martw się, to normalne. Wiąże się to z rozluźnianiem tkanek, które zostały poddane lekkiemu napinaniu.

Jako skutki uboczne zostały zidentyfikowane: otarcia prącia, reakcja skórna na tylną część pręta (miejsce stosowania taśmy silikonowej) i na podstawie penisa (miejsce nałożenia plastykowanego pierścienia), ból, dychromatyczne zmiany na prąciu, parestezja żołędzi, uczucie mrowienia, obrzęk lub zatrzymywanie płynów w żołędzi, rany, podrażnienia, stan zapalny i dyskomfort. Jeśli któreś z powyższych skutków niepożądanych pojawi się podczas stosowania urządzenia, zdecydowanie zalecamy przerwanie jego używania i zastosowanie się do właściwych wskazówek zawartych w Dziale 11 instrukcji użytkownika

- 🔍 Nie należy używać **Andropenis®**: W czasie snu. Wykonując intensywne ćwiczenia fizyczne lub uprawiając sport. Po zażyciu narkotyków lub spożyciu alkoholu. W przypadku wrzodów, chorób przenoszonych drogą płciową czy ran w okolicach genitaliów. Osoby mające osłabione ręce lub problemy w posługiwaniu się urządzeniem. Podczas stosunku seksualnego.
- 🔍 Używając urządzenia, należy surowo przestrzegać zasad higieny.
- 🔍 Chcąc oddać mocz czy kał, należy zdjąć urządzenie.
- 🔍 Jeśli w czasie używania urządzenia będziesz miał erekcję, nie martw się: wówczas po prostu nieco mocniej uciśnię ono członek.
- 🔍 Jeśli pojawiają się białe pęcherze na żołędzi, nie martw się: oznacza to zatrzymywanie płynów z powodu ściśniętej żołędzi. Pęcherze znikają po masażu żołędzi palcami. Przyczyną może być zbyt mocno ściskająca taśma silikonowa.

Jeśli na żołędzi pojawiają się białe punkty, udaj się do lekarza, ponieważ może to oznaczać grzybicę.

WAŻNE: Stosowanie leków na wzmocnienie lub porost włosów, środków antydepresyjnych, nasennych, przeciwłukowych i uspokajających może zmniejszyć skuteczność leczenia.

Niezdolność do osiągnięcia erekcji wystarczającej do odbycia stosunku seksualnego może być oznaką poważnych problemów zdrowotnych. Należy skonsultować się ze swoim lekarzem aby uniknąć potencjalnie szkodliwego opóźnienia w wystawieniu diagnozy.

11. MAŚCI

System mocujący **Andropenis®** do żołądzia może wywołać, w rzadkich przypadkach, podrażnienia lub dyskomfort w danym miejscu. Aby zapobiec temu, należy używać załączonych środków ochronnych i paska **Androcomfort® band**. Jeśli pojawią się wspomniane podrażnienia, zalecamy serię maści, które można nabyć w celach zapobiegawczych, jednak zaleca się wizytę u lekarza.

PRZECIWPALNA / MAŚĆ Z ANTYBIOTYKIEM

W razie drobnego podrażnienia, otarcia prącia, reakcji skórnej prącia przy tylnej części pręta (miejsce stosowania taśmy silikonowej) lub u podstawy penisa (miejsce nałożenia plastikowanego pierścienia): Stosować maść wieczorem i korzystać z urządzenia w ciągu dnia do czasu gdy objawy nie ustąpią. W przypadku jeśli objawy te nie ustąpią skonsultować to z lekarzem.

MAŚĆ GOJĄCA / TLENEK CYNKU

W razie wytworzenia się rany lub wrzodu:

- ☒ Przerwać korzystanie z urządzenia na okres 5 dni. Stosować maść przeciwpalną dwa razy dziennie rano i wieczorem oraz maść gojącą na noc. Jeżeli rana się nie goi, należy przestać korzystać z urządzenia i skontaktować się ze swoim lekarzem.

MAŚĆ PRZECIWPALNA

W razie powstania stanu zapalnego lub obrzęku na żołądzi, bądź u nasady penisa lub w okolicy łonowej, należy stosować maść przeciwpalną taką jak np. „Cortaid”. Maść przeciwpalna jest także zalecanym rozwiązaniem w przypadku zatrzymania płynów w żołądzi.

KREM NAWILŻAJĄCY

W razie uczucia lekkiego bólu trzonu penisa należy co wieczór wmasowywać w penis krem nawilżający, używając do tego delikatnych rozciągających ruchów.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

Jeśli któryś z powyższych objawów utrzymuje się dłużej, niż trzy dni, odczuwasz ból lub zauważasz zaczerwienienie, opuchliznę lub gorączkę; niezwłocznie skontaktuj się z lekarzem. W trakcie stosowania urządzenia, zabrania się nakładania na prącie maści lub kremów zawierających miejscowe środki znieczulające (lidokainę, ksylokainę).

Zastosowanie tego urządzenia zależy od konkretnych potrzeb każdego użytkownika. Pod względem medycznym i chirurgicznym, nie jest to urządzenie do użytku powszechnego i wymaga pomocy specjalisty w czasie pierwszego założenia oraz nadzoru lekarskiego w trakcie całego leczenia. Pod względem estetycznym, jest to urządzenie do użytku powszechnego i zaleca się jedynie dowolny nadzór medyczny. W przypadku, gdy pacjent zauważy jakiegokolwiek anomalia w trakcie stosowania urządzenia, natychmiast powinien zgłosić się on do swojego lekarza.